



AyudasDinámicas

## AD560 ASIDERA ENTRADA Y SALIDA BAÑERA

Antes de utilizar esta asidera es esencial que lea y se familiarice con este manual de instrucciones. Conserve estas instrucciones para futuras consultas.

### INSTRUCCIONES DE INSTALACION

1. Limpie el área de la bañera en la que instalará la asidera.
2. Afloje el pomo para abrir la pieza inferior de la asidera para colocarla en el borde de la bañera.
3. Inserte la asidera en el área de la bañera de tal manera que el pomo de regulación quede hacia el exterior.
4. Apriete el pomo para fijar la asidera con seguridad a la bañera.



### PRECAUCIONES

- Antes de usar compruebe que la asidera está fija.
- Este producto es para ayudas a equilibrar y como apoyo para salir y entrar de la bañera. NO ha sido diseñada para soportar el peso total del usuario.
- Cuando salga y entre de la bañera agárrese firmemente y aplique la fuerza en la parte superior de la asidera.
- No mueva la asidera hacia los lados, puede aflojarse y causar daños.
- No apriete demasiado la asidera ya que podría dañar la asidera o la bañera.

### MANTENIMIENTO / CUIDADO

Limpie la asidera con detergente suave y agua o un limpiador antibacteriano. No utilice limpiadores o paños abrasivos. Séquela antes de cada uso. Periódicamente compruebe que se ajusta correctamente.

### GARANTIA

La garantía se extiende por 2 años, según Ley 23/2003 de Garantías que hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido.



Importado por:  
**Ayudas Dinámicas**  
c/Llobregat, 12 Polígono Industrial URVASA  
08130 Santa Perpètua (Barcelona) ESPAÑA  
tel. 935 74 74 74 fax. 935 74 74 75  
[info@ayudasdinamicas.com](mailto:info@ayudasdinamicas.com)  
[www.ayudasdinamicas.com](http://www.ayudasdinamicas.com)

