



# Ayudas Dinámicas

## MANUAL DE USUARIO AD 542



## POR FAVOR LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR LA SILLA DE DUCHA Y WC

Guarde estas instrucciones, pueden serle de utilidad más adelante.


### Indicaciones

Sillas de baño fabricadas en aluminio. El asiento es blando y queda a una altura que permite situar la silla directamente sobre la mayoría de inodoros. Está equipada con 4 ruedas.

### Comprobación de entrega

En primer lugar compruebe que usted recibe los siguientes componentes en la caja:

Nº	Descripción	Cantidad
1	Parte lateral .....	x 2
2	Parte frontal .....	x 1
3	Barra trasera .....	x 1
4	Respaldo .....	x 1
5	Asiento tapizado .....	x 1
6	Tornillo M6x55L .....	x 8
7	Arandela .....	x 10
8	Tornillo M6x35L .....	x 2
9	Tuerca hexagonal .....	x 10
10	Tornillo M6x15L .....	x 2
11	Abrazadera .....	x 2

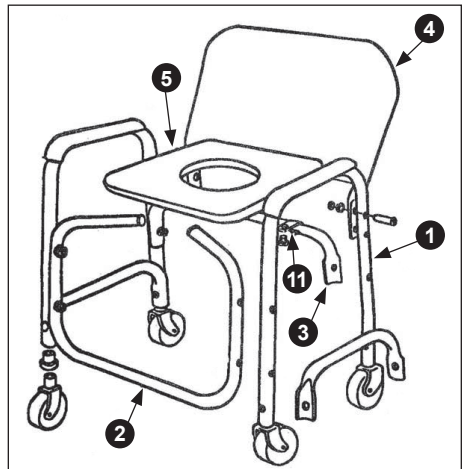


### Montaje

#### Paso 1

Coloque la parte frontal entre las partes laterales. Inserte 4 tornillos M6x55L (6), 4 arandelas (7), 4 tuercas hexagonales (9).


**No los apriete todavía.**

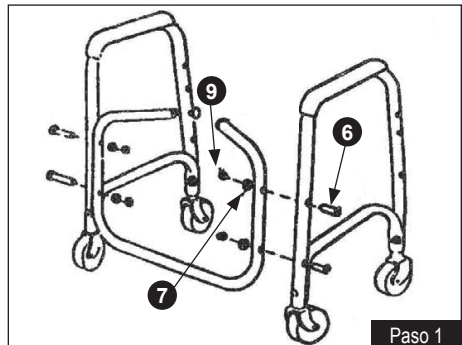

Paso 1

**Paso 2**

Inserte las abrazaderas (x 2) en la barra trasera. Coloque la barra trasera entre las partes laterales. Inserte 2 tornillos M6x35L (8), 2 arandelas (7), 2 tuercas hexagonales (9). **No los apriete todavía.**

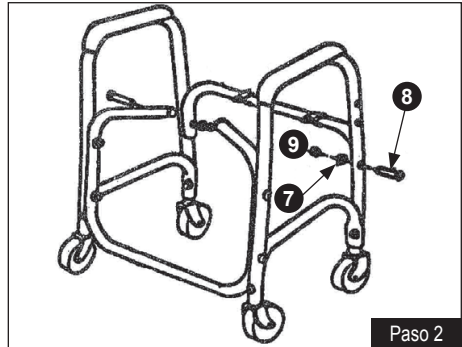

Paso 2

**Paso 3**


Coloque el respaldo en la parte superior trasera de los laterales. Inserte 4 tornillos M6x55L (6), 4 arandelas (7), 4 tuercas hexagonales (9). **No los apriete todavía.**



Paso 3

**Paso 4**

Apriete la parte A, B y C. Coloque el asiento tapizado en el chasis. Inserte 2 tornillos M6x15L(10) en las abrazaderas.

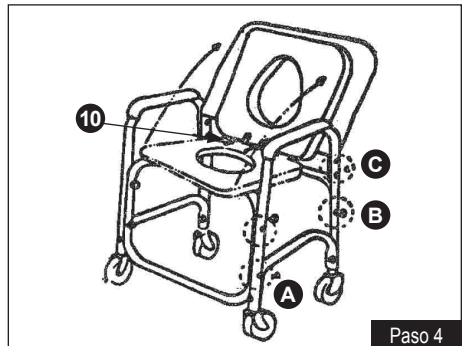

Paso 4

**Limpieza**

No use detergentes abrasivos para limpiar la silla, utilice un detergente suave. Seque la silla con un paño suave. En caso de necesidad de desinfección hágalo con productos convencionales.

**Mantenimiento**

Compruebe que las ruedas giran bien y están en buen estado. Recuerde que habitualmente se enganchan hilos, pelos y otros residuos en los ejes impidiendo que giren libremente. Periódicamente compruebe tornillos y tuercas.

## **GARANTÍA**

La garantía se extiende por 2 años, según la Ley vigente de Garantías que hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido.

En el caso que requiera una reparación de su producto, póngase en contacto con el distribuidor que se lo vendió. A través de él, la fábrica le proporcionará todo el soporte de su garantía.



Importado por:  
**Ayudas Tecno Dinámicas S.L.**  
Llobregat, 12  
08130 Santa Perpètua - Barcelona  
tel. 935 74 74 74 fax. 935 74 74 75  
[info@ayudasdinamicas.com](mailto:info@ayudasdinamicas.com)  
[www.ayudasdinamicas.com](http://www.ayudasdinamicas.com)



Fabricado por:  
ULTIMATED CARE CORPORATION, LTD.  
6 floor, No. 139. Sec. 1 Xintai 5th Road  
Xizhi District, New Taipei City 22102, Taiwan

AD 542 - Versión 1.0 - 2017/11